

モード設定画面

CPAPの設定画面

モードがCPAPに設定されている場合にのみ表示されます。

IPAPの設定画面

モードがCPAPに設定されていない場合にしか表示されません。

EPAPの設定画面

モードがCPAPに設定されていない場合にしか表示されません。


呼吸回数の設定画面

モードがS/Tに設定されている場合にのみ表示されます。


吸気時間の設定画面

モードがS/Tに設定されている場合にのみ表示されます。

Flexの設定画面

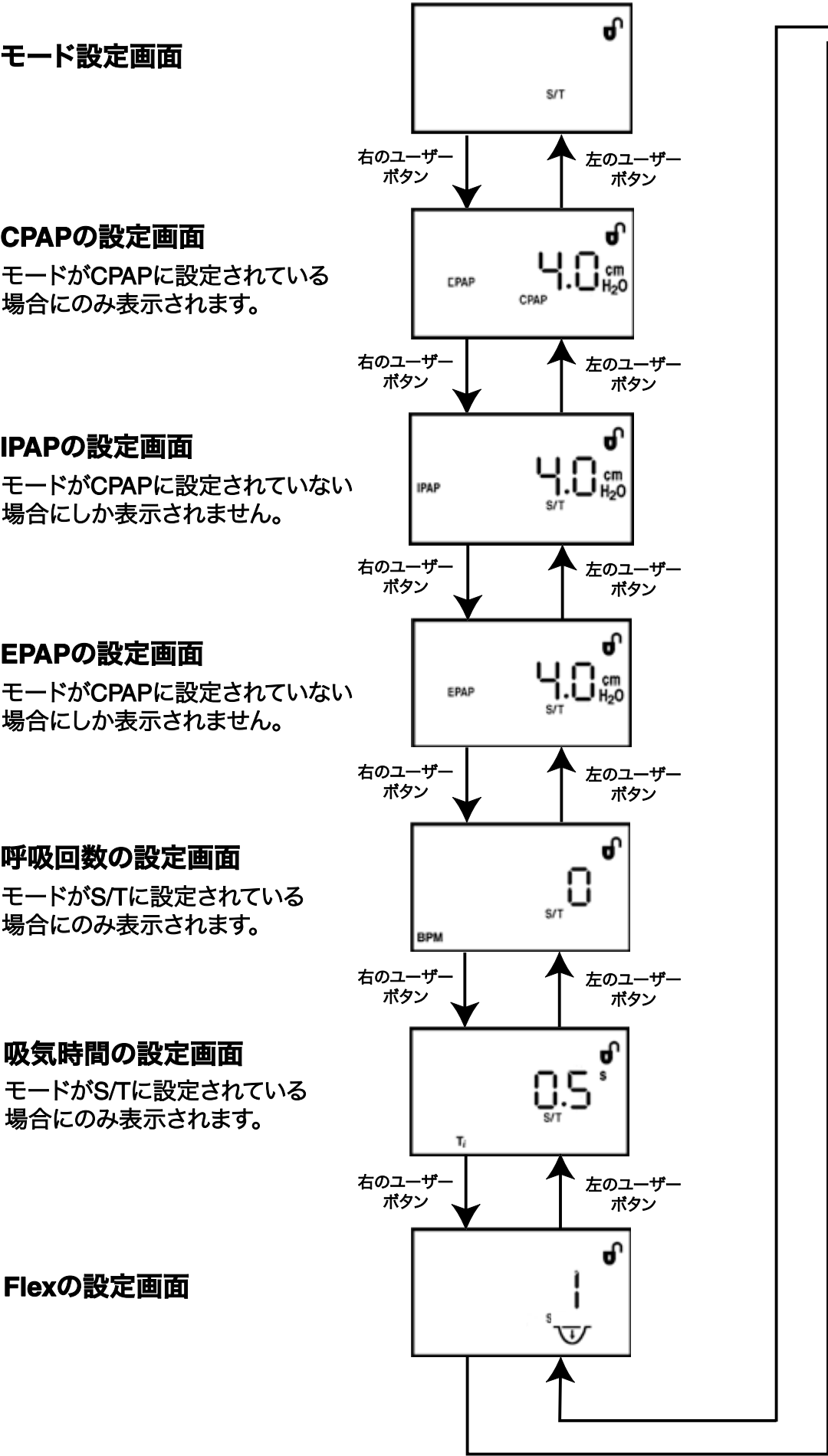


ランプ時間の設定画面

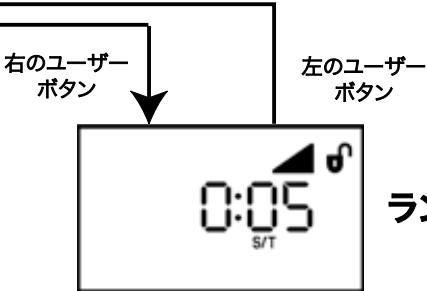


ランプ開始時の圧力設定画面

ランプ時間が[0]よりも大きい値に設定されている場合にのみ表示されます。

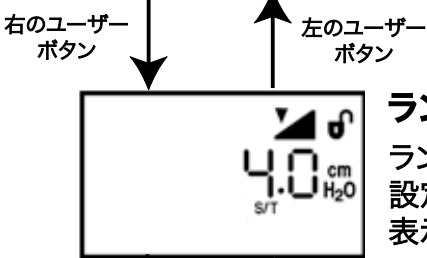


ライズタイムの設定画面


Flex設定が[0]に設定され、モードがCPAPに設定されていない場合にのみ表示されます。

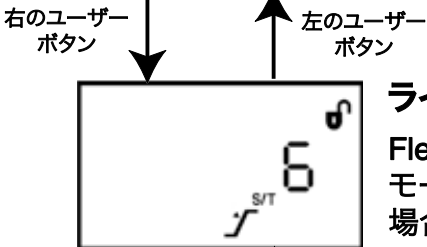


無呼吸アラームの設定画面

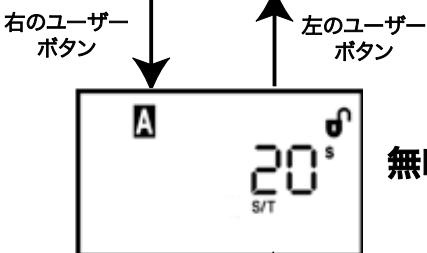


患者回路外れアラームの設定画面

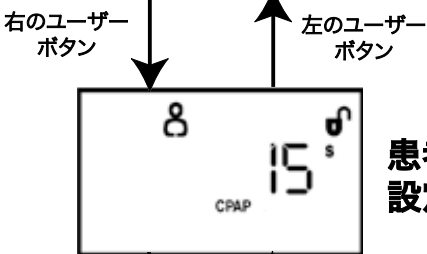

治療時間メーターのリセットの設定画面

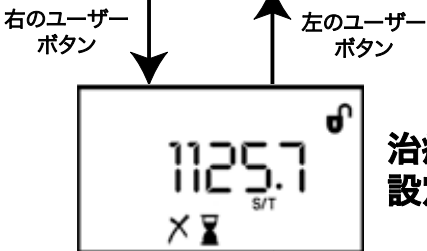

LEDバックライトの設定画面

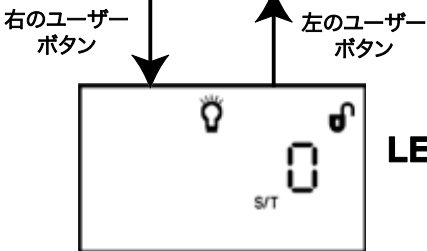

アクセスレベルの設定画面

