


呼気弁の組み立て手順


1. ポペットダイヤフラムを呼気弁キャップのガイドピンに添ってスライドさせます。
2. チューブコネクターを下にして、上から呼気弁ボディを被せます。チューブコネクターが呼気弁の呼気ガス出口と平行になっていることを確認します。
3. 固定リングを呼気弁ボディにねじ込み（時計回り）、しっかり固定します。

アウトレットブーツ（上部）
（呼気モジュールを取り出す前に
外す）


呼気弁チューブ（2本）
※2本のチューブはどちら
のコネクターの接続にも
機能上問題ありません。

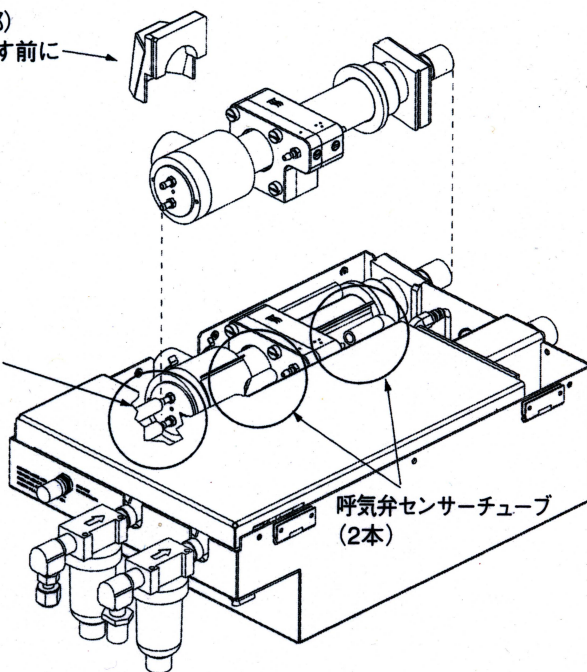

ガス供給ユニット：呼気モジュールの取り外し

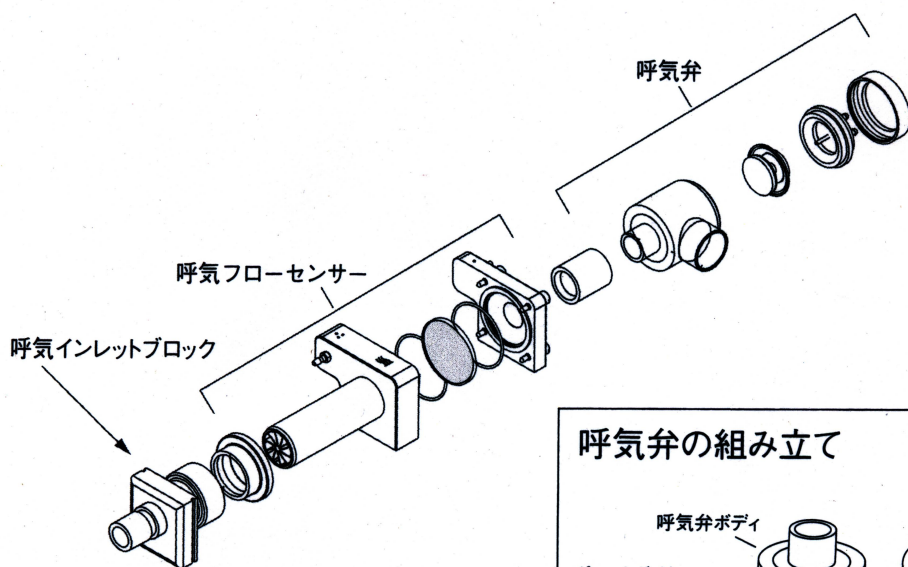

呼気弁の組み立て

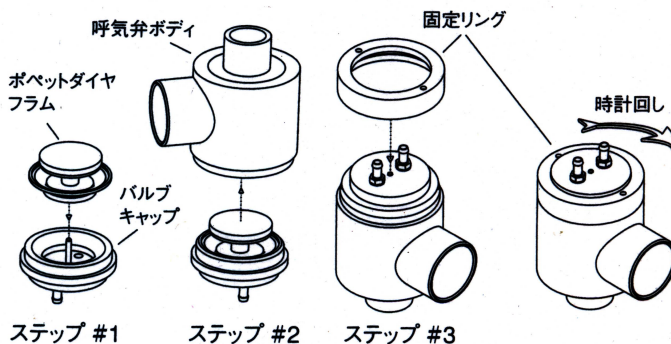

ガス供給ユニット：呼気モジュールの分解／組み立て