



【成人用】標準例
F&P RT204 (デュアルヒートタイプ)

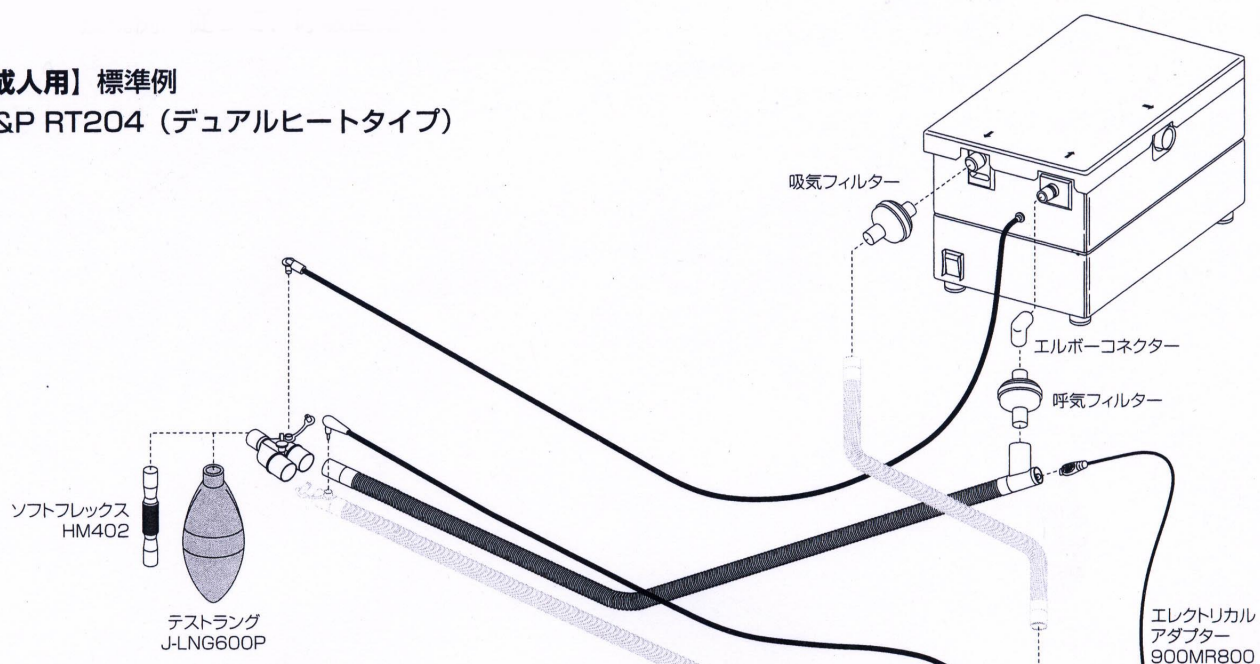

【小児／乳幼児用】標準例
F&P RT225 (シングルヒートタイプ)

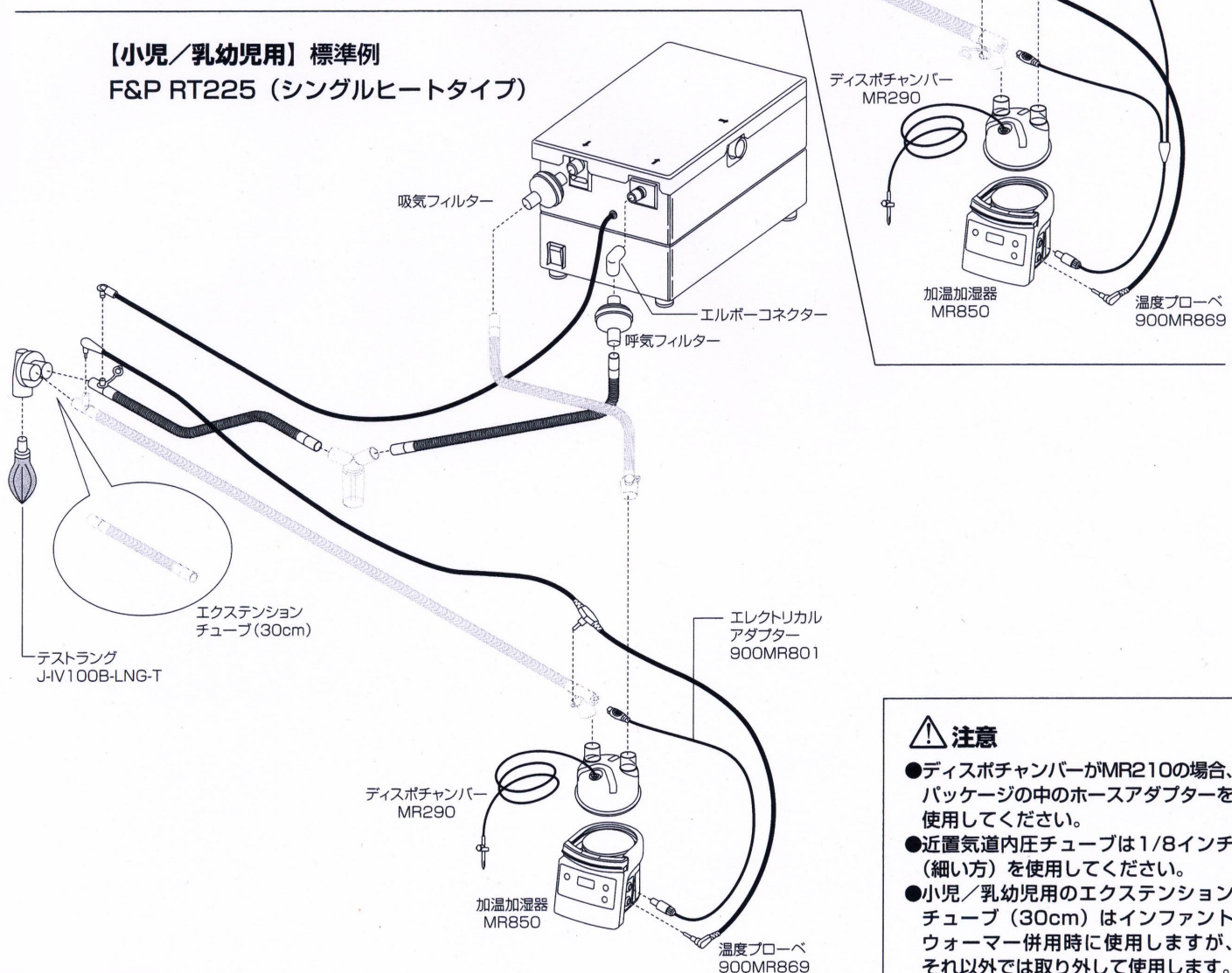

呼吸回路の組み立て

⚠ 注意

- ディスポチャンバーがMR210の場合、パッケージの中のホースアダプターを使用してください。
- 近置気道内圧チューブは1/8インチ（細い方）を使用してください。
- 小児／乳幼児用のエクステンションチューブ（30cm）はインファントウオーマー併用時に使用しますが、それ以外では取り外して使用します。